

MONTAGE ET FIXATION



- 01.**
Présenter le couvercle au-dessus de la cuve.



- 02.**
Exercer plusieurs pressions sur le couvercle avec le plat de la main pour assembler tout son périmètre à la cuve.

FERMETURE PROVISOIRE

Préconisé entre chaque usage



- 01.**
Fermer la trappe.



La languette de manipulation reste visible et accessible.

FERMETURE DÉFINITIVE

Lorsque le conteneur est plein



- 01.**
Fermer la trappe.



- 02.**
Appuyer sur la languette de la trappe pour la condamner.



- 03.**
La languette de manipulation n'est plus accessible.
Le conteneur est verrouillé.

UTILISATION DU COUVERCLE



L'opercule peut être utilisé pour éjecter l'aiguille usagée d'une seringue non sertie.



Attention : ne jamais dépasser la limite de remplissage.